

Handleiding: Aanvulling voor model SWT-1S

Aanvullend op de informatie in onderhavige gebruiksaanwijzing gelden voor het Swiss-Trac model SWT-1S de volgende bepalingen:

Het Swiss-Trac model SWT-1S is uitsluitend bedoeld voor gebruik op vlak terrein. In vergelijking met model SWT-1 bedraagt de maximaal toegestane stijging bij model SWT-1S maar 12 %. Daardoor kan er niet mee worden gereden op sterk heuvelachtig terrein.

Veiligheidsaanwijzingen

Trekcapaciteit en helling

De maximale trekcapaciteit van 120 kg mag nooit worden overschreden. Het maximale hellingspercentage van 12 % is afhankelijk van de ondergrond.
→ zie gebruiksaanwijzing blz. 4

Bij een te sterke stijging of te grote getrokken belasting klinkt er een pieptoon en gaat de Swiss-Trac automatisch langzamer lopen. Verlaag uw snelheid onmiddellijk door gas terug te nemen, anders schakelt de Swiss-Trac binnen 5 seconden uit en moet hij met de sleutel uit- en weer ingeschakeld worden. Voorkom zulke overbelasting omdat dit de levensduur van de Swiss-Trac verkort.

Toelating op de openbare weg

In Zwitserland is er op dit moment geen toelatingstest noodzakelijk. Vanwege de snelheid van 9 km/u is bijvoorbeeld in Duitsland voor het gebruik op de openbare weg een goedkeuring van de verantwoordelijke keuringsinstantie een verzekering, achterlichten en reflectoren conform het Duitse wegenverkeersreglement noodzakelijk.

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de test en de verzekering van de aanhangwagen, waaraan kosten zijn verbonden.



Rijden en de snelheid regelen

Met de snelheidsschakelaar kan de maximale snelheid vooraf worden ingesteld: In stand 1 bedraagt deze ca. 4,5 km/u, in stand 2 ca. 9 km/u.
→ zie gebruiksaanwijzing blz. 8

Vervoer in de auto

Schakel de snel/langzaamsschakelaar altijd in stand 1 om de Swiss-Trac via de speciale rails in de auto te laden.
→ zie gebruiksaanwijzing blz. 18

Vervoer in het vliegtuig

Het gewicht van Swiss-Trac SWT-1S bedraagt 70 kg.
→ zie gebruiksaanwijzing blz. 20

Banden

Bandenspanning, achterwiel: 1,5 bar.
Voor model SWT-1S zijn alleen banden met een kruis-, tractorprofiel of spikes leverbaar.
→ zie gebruiksaanwijzing blz. 22

Technische gegevens

Model	SWT-1S
Hulpmiddel-nr. (DE)	18.99.04.0020
Actieradius	Meer dan 30 km op een vlak stuk
Snelheid	Traploos tot 6 km/u c.q. zie typeplaatje
Max. aanhanglast	120 kg (bestuurder met rolstoel en bagage)
Max. helling	12 % bij 120 kg lichaamsgewicht
Zijwaartse overhelling	Max. 20 %
Max. hoogte trede	13 cm naar boven 15 cm naar beneden
Max. hindernishoogte	Uitstekend van de grond 8 cm
Gewicht	70 kg
Transportmassa	Ca. 75×51×53 cm
Motorvermogen	400 Watt c.q. zie typeplaatje
Accu's	2 × 12V/50AH/C ₂₀
	Type: AGM (lekvrij)
	Klasse 8, VN-nr. 2800
	IATA/ICAO A67 conform
Laadapparaat	100-240 VAC/50-60 Hz
Laadapparaat vermogen	24 Volt, 8 A
Laadtijd	Min. 8 uur bij lege accu's
Hoofdzekering	40 Amp. ATO-zekering Art: 257040.LN
Lampen	24 Volt, 15 Watt / P26
Remmen	Dynamische motorrem Mech. handrem
Afmetingen banden	200×50 mm / 4.10/3.50-4, 4PR
Bandenspanning	Voor 2,5 bar Achter 1,5 bar Speciale banden 1,5 bar
Max. temperatuur	Omgeving: -20 °C tot 45 °C Accu's laden: 10 °C tot 45 °C Opslag: 10 °C tot 25 °C